


Incidin foam




Nouveau PARFUM
Nouvelle PRESENTATION

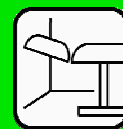

Détergent désinfectant par pulvérisation (spray moussant) des surfaces et du mobilier : paillasse, plan de travail, table d'opération, dispositifs médicaux, chariot, ...

Incidin foam

Nettoyage et Désinfection par pulvérisation (spray moussant) des surfaces et mobilier : paillasses, tables d'opération, dispositifs médicaux, chariots. Préparation prête à l'emploi

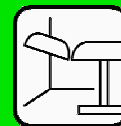

Domaine d'application

Nettoyage et désinfection par pulvérisation (spray moussant) des surfaces, mobilier, paillasses, tables d'opération et dispositifs médicaux.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi.
Pulvériser un film continu sur toutes les surfaces à une distance de 30 à 40 cm. Frotter la surface avec une lavette non tissée. Laisser sécher les surfaces. Ne pas rincer.

Composition

Dans 100 g de produit : 20 g 2-Propanol, 10g Ethanol, 0,2 g Chlorure de benzalkonium, 0,01 g Glucoprotamin

Caractéristiques

Liquide.
Pourcentage poids alcool < 30 %
Pont ignition (Abel-Pensky) : 24° C (DIN 51755, T1 et 2)
Point d'auto inflammabilité : >55°C
Densité = 0,95

Présentation

Carton de 16 flacons de 750 ml avec 2 pistolets pulvérisateurs mousse. Réf : 3046010

Activité

Activité antibactérienne : EN 1040, EN 1276 (conditions de saleté), pr EN 13713 (conditions de propreté et de saleté).
Actif sur le Mycobacterium terrae (DGHM)
Activité antifongique : Actif sur Candida albicans selon la méthodologie de la norme EN 1275.
Actif sur le Rotavirus, le Papova SV 40, l'Adénovirus et le virus de la Vaccine.
Actif sur les virus HIV 1 et HBV.

Conseils de Sécurité

Conserver hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Risques particuliers

Irritant.
Inflammable. Irritant pour les yeux
Les vapeurs peuvent entraîner une somnolence et des étourdissements

Compatibilités

Utilisable sur : métal, matière plastique, surfaces vernies, polyméthyl méthacrylate, acrylique, verre,...

Recommandations

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcool. Eviter l'usage abondant dans un local fermé. Conserver dans son récipient d'origine. Ne pas pulvériser en présence d'un malade atteint d'insuffisance respiratoire. Si des appareils électriques sont en fonctionnement il faut s'assurer de la protection contre les explosions ou la mise hors tension des appareils. Température de stockage : < 25 °C

Contrôles Qualité

Le produit **Incidin foam** est fabriqué selon une organisation qualité conforme à la norme ISO 9001.
Le produit **Incidin foam** est conforme à la Directive 93/42/CEE relative au marquage CE des dispositifs médicaux

Information

Sur simple demande :
fiche de données de sécurité,
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter notre Direction Scientifique :
(Tél : 01 40 93 95 33).

Soutien technique

Exemples de mode d'emploi illustrés
Fiches d'évaluation
Suivi des tests
Formation à l'utilisation des produits

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel

CE 0297

ECOLAB®

www.ecolab.com