







## PURELL® Lingettes Antimicrobiennes Plus

**Lingettes antiseptiques pour les surfaces**

**Marchés cibles :** milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgences, loisirs

- **Produit actif sur Coronavirus**
- **Facile à utiliser**
- **Fabriqué en France**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 g/kg), Chlorhexidine digluconate CAS 18472-51-0 (1,2 g/kg), parfum			
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-tissé : spunbonded blanc, 22g/m<sup>2</sup></li> <li>• Parfum : mentholé</li> </ul>			
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durée de conservation : 24 mois avant ouverture, conserver à l'abri de la chaleur dans des conditions normales de stockage</li> <li>• Conserver à température ambiante dans son emballage d'origine fermé</li> <li>• Eviter les températures supérieures à 40°C</li> <li>• Après ouverture à utiliser de préférence dans le mois</li> <li>• Ne pas utiliser une lingette sèche</li> </ul>			
<b>Mode d'emploi</b>	<p>1. Pour amorcer la première lingette, retirer le couvercle de la boîte et tirer la première lingette par le centre du rouleau, avec les mains propres. Remettre le couvercle en faisant passer la lingette par l'ouverture dans le couvercle.</p> 	<p>2. Appliquer la lingette de manière à humidifier la surface à désinfecter. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas utiliser une lingette sèche. Bien refermer le conditionnement après usage.</p> 	<p>3. Laisser agir selon l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer.</p> 	<p>4. Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets.</p> 
<b>Réglementation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit biocide TP2</li> <li>• Usage exclusivement professionnel</li> </ul>			
<b>Environnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emballage recyclable</li> <li>• Eliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à déchets</li> <li>• Ne pas jeter le produit dans l'environnement</li> </ul>			
<b>Précautions d'emploi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas avaler</li> <li>• Ne pas utiliser avec d'autres produits</li> <li>• Réservé à un usage sur des surfaces, des objets et des petits matériels ne présentant pas de rugosité</li> <li>• L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection)</li> <li>• En cas de réutilisation, risque de contamination</li> <li>• Pour plus de renseignements, se référer à la fiche de données de sécurité du produit</li> <li>• En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche</li> </ul>			

## ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
Bactéries	EN 1276* (v.2019)	30s
	EN 13727* (v.2015)	30s
	EN 13727* (v.2015), <i>Staphylococcus aureus</i> SARM, <i>Enterococcus faecium</i> résistant à la Vancomycine (VRE), <i>Escherichia coli</i> BLSE	30s
	EN 13697** (v.2015)	1 min
	EN 16615* (v. 2015), <i>P.aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i>	15 min
Levures	EN 13624* (v.2013), <i>Candida albicans</i> + <i>Candida auris</i>	1 min
	EN 13697* (v.2015), <i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 13697* (v. 2019), <i>Candida auris</i>	5 min
	EN 1650* (v.2019), <i>Candida albicans</i>	1 min
	EN 16615* (v. 2015), <i>Candida albicans</i>	15 min
Virus	Actif sur :	
	EN 14476* (v.2019), Coronavirus BCoV (virus modèle)	30s
	EN 14476* (v.2015), Rotavirus	1 min
	EN 14476* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA) Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH...	30s

\*Etude réalisée en conditions de propreté

\*\*Etude réalisée en conditions de saleté

## CONDITIONNEMENT

## DIMENSIONS DE LA LINGETTE

## CODE PRODUIT

PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Boite de 100 lingettes x 12	130 x 210 mm	9202-12-EEU00
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Recharge de 1200 lingettes x 2	150 x 200 mm	9218-02-EEU00

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'information avant d'utiliser le produit.



GOJO Industries - Europe, Ltd.\*  
Units 5 & 6  
Stratus Park  
Brinklow  
Milton Keynes  
MK10 0DE UK  
Tel: +44 (0) 1908 588444  
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint  
– a GOJO Family Company  
8 Rue Léon Jouhaux  
77183 Croissy-Beaubourg –  
France  
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00  
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.  
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,  
28046 Madrid, Espagne  
Tel: +351 218 988 230  
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl  
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 11,  
c/o RSM (Gva) SA,  
1227 Carouge  
GE +41 225706057

Prodene GmbH –  
a GOJO Family Company  
Im Trutz Frankfurt 55  
60322 Frankfurt, Allemagne  
Tel.: +49 (0) 6074 9196057  
Fax: +49 (0) 6074 9196685